

Floorstand

- 17.1086
- 17.1066

FS VarioFloat Light QP
FS VarioFloat QP

Sicherheitshinweise
Safety Instructions







Montage
Assembly Instructions







Handhabung
Handling






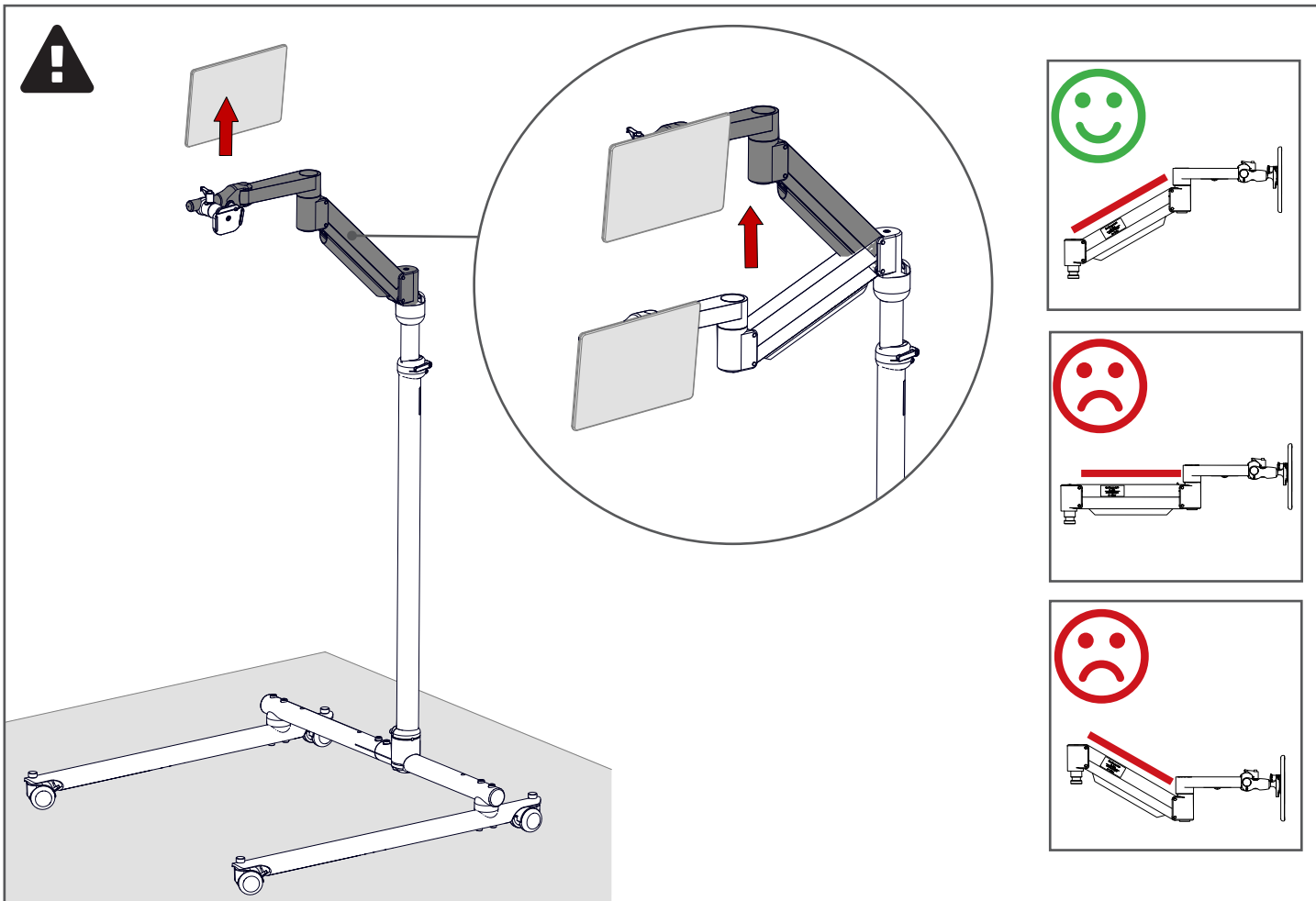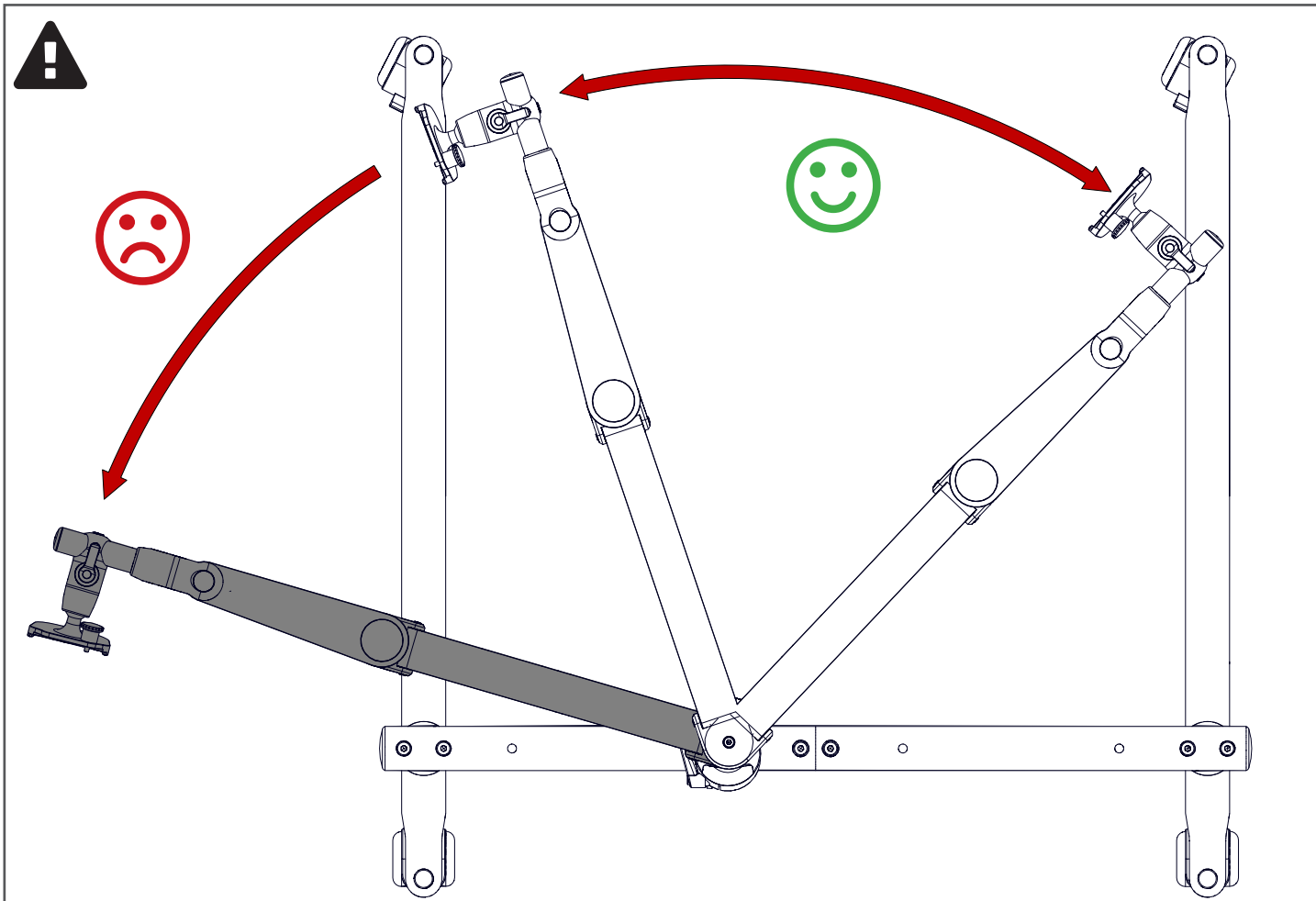


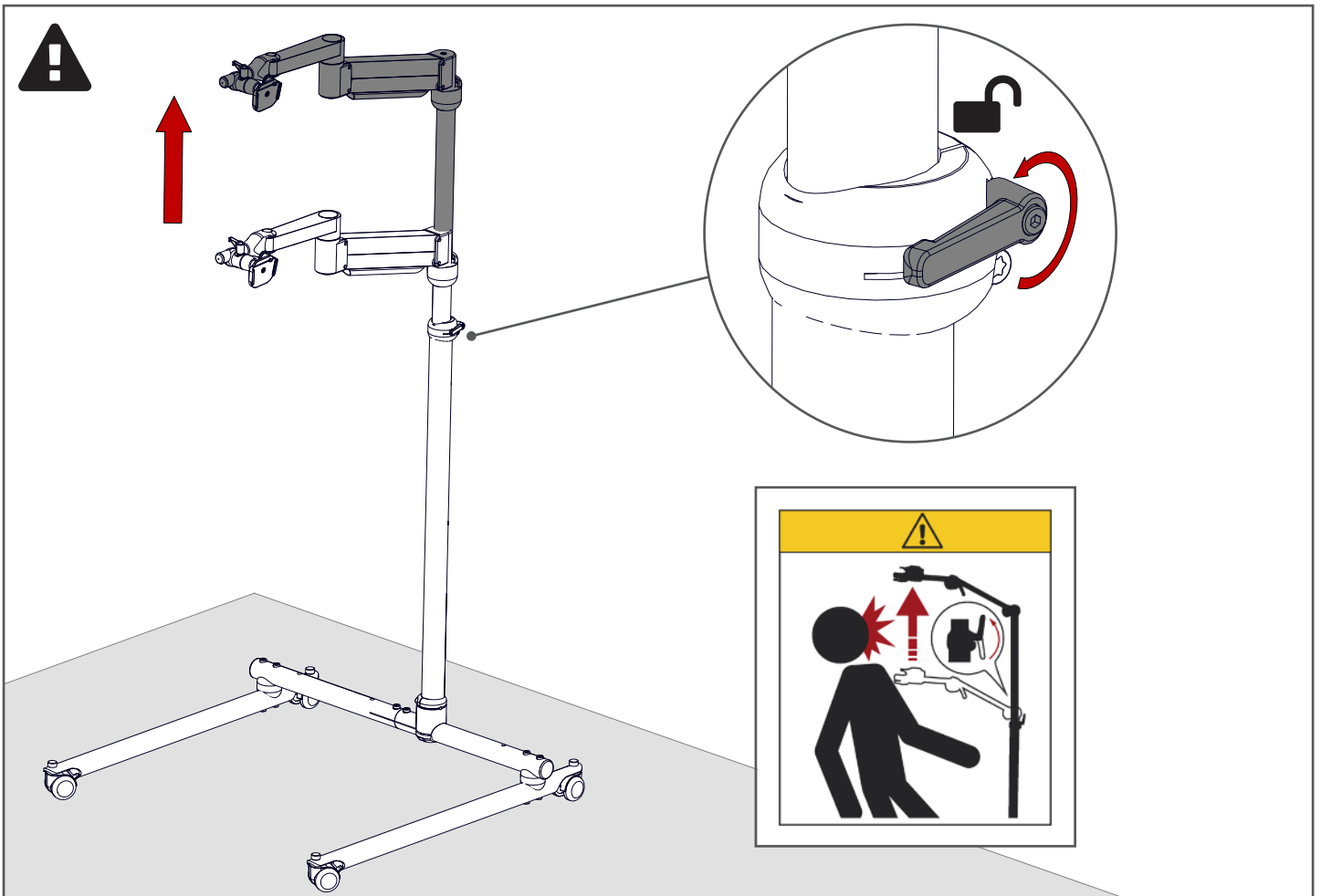
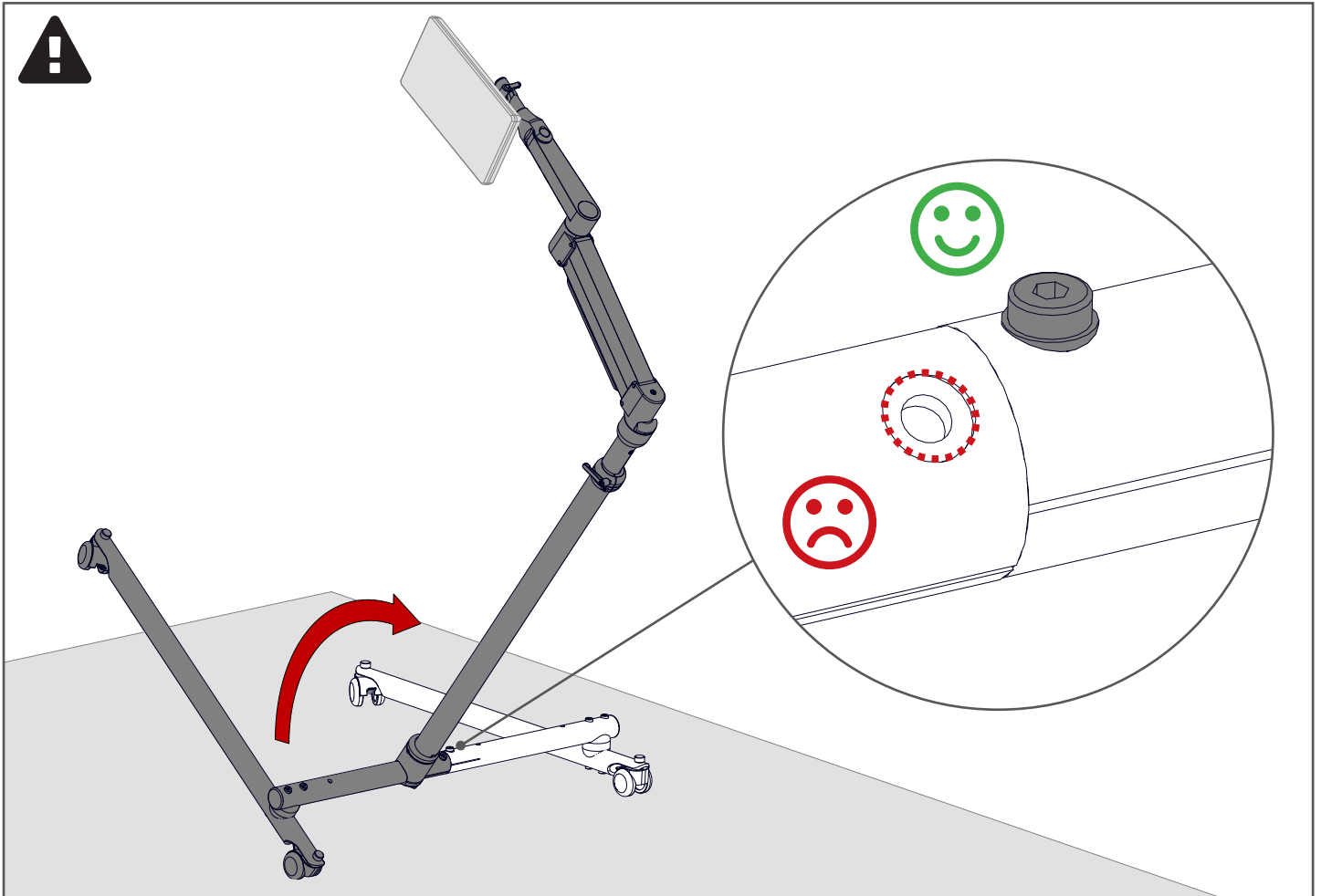


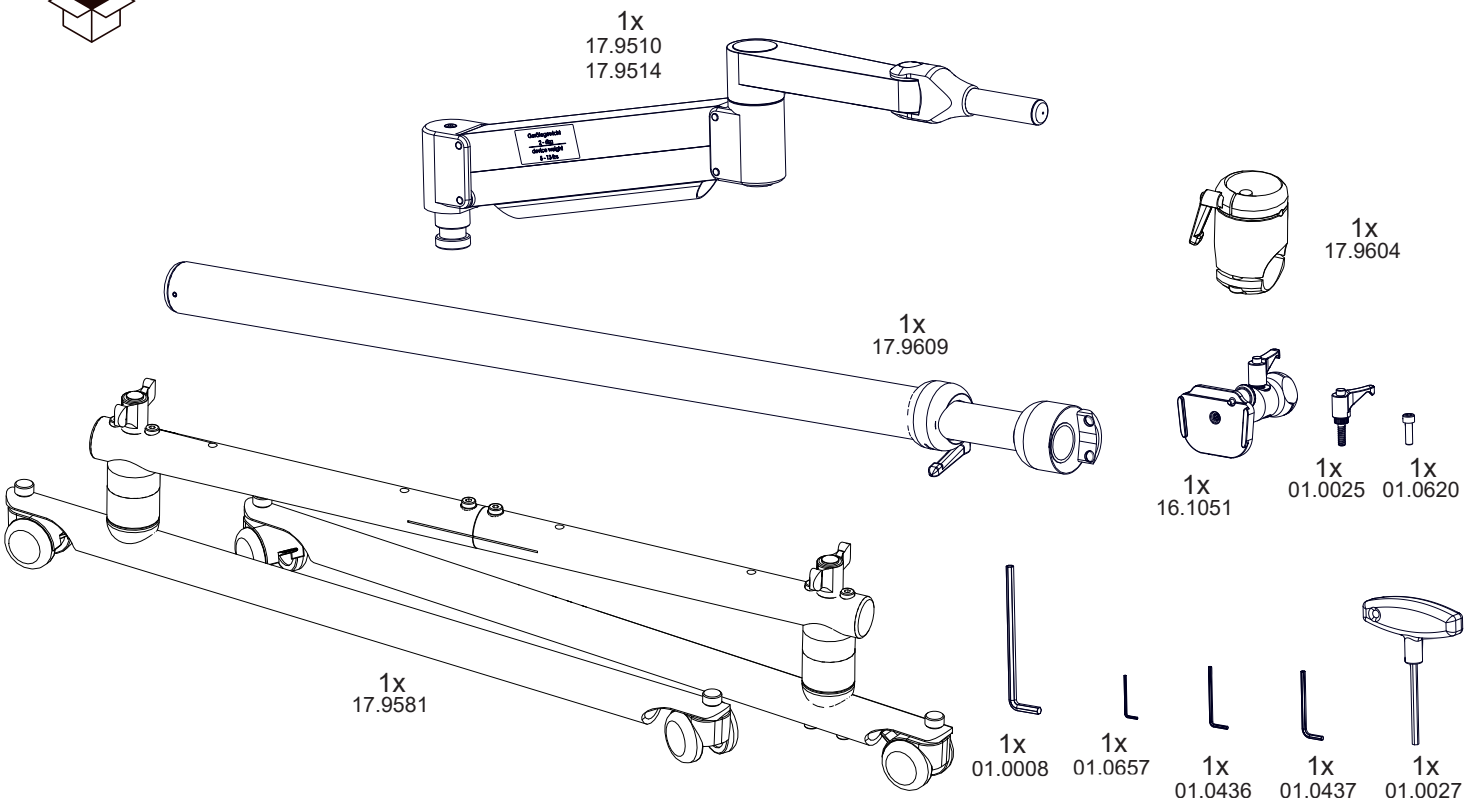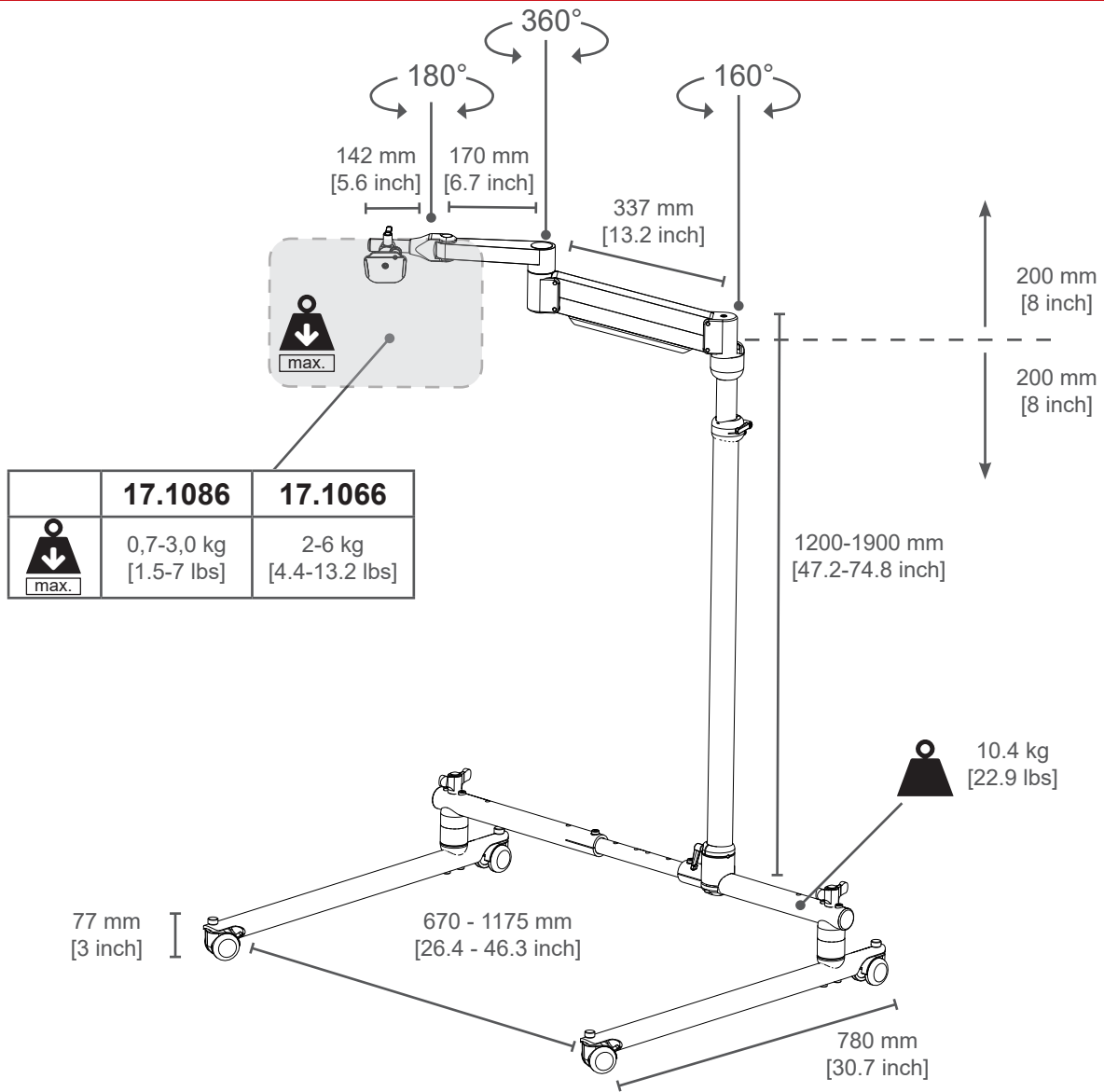

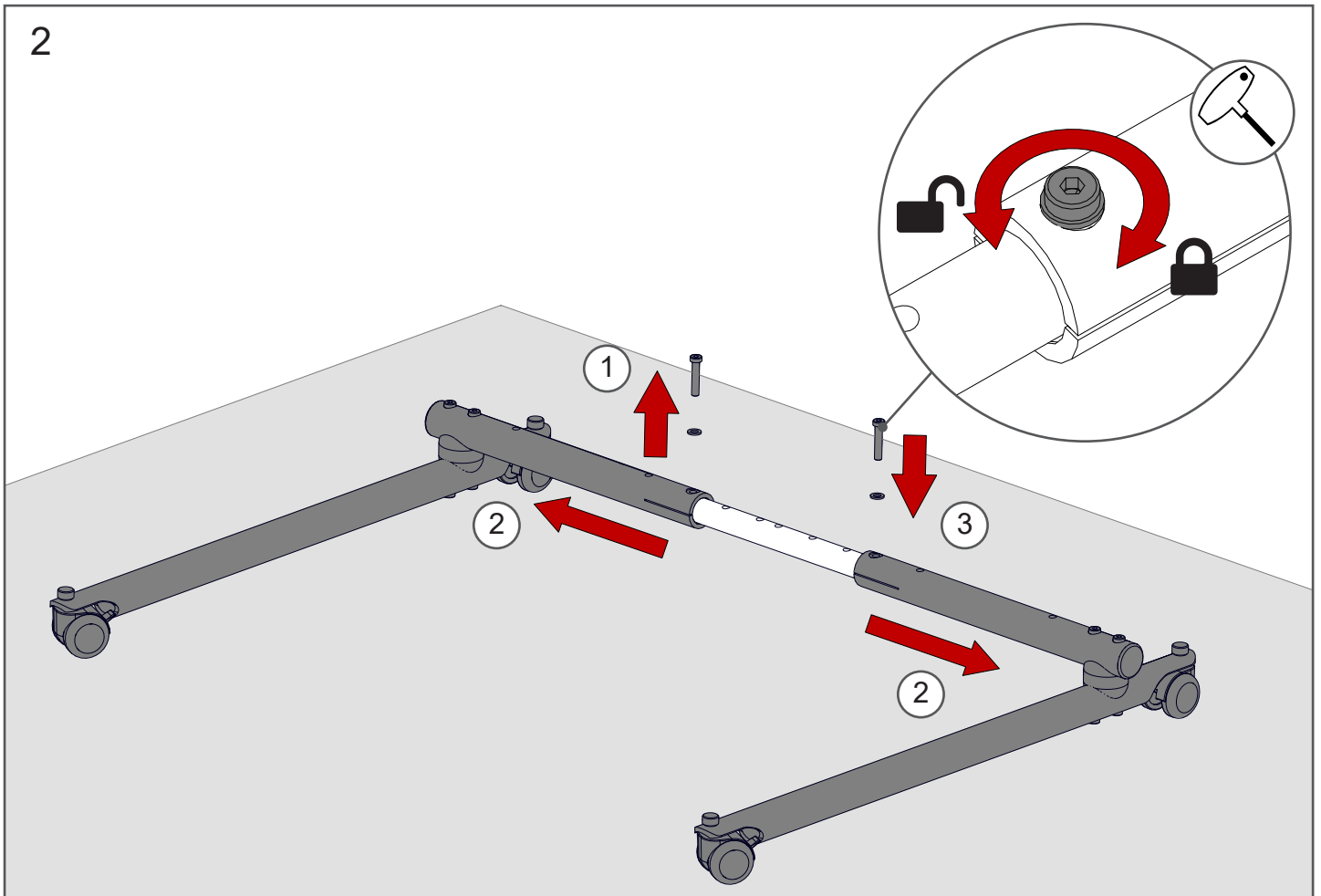
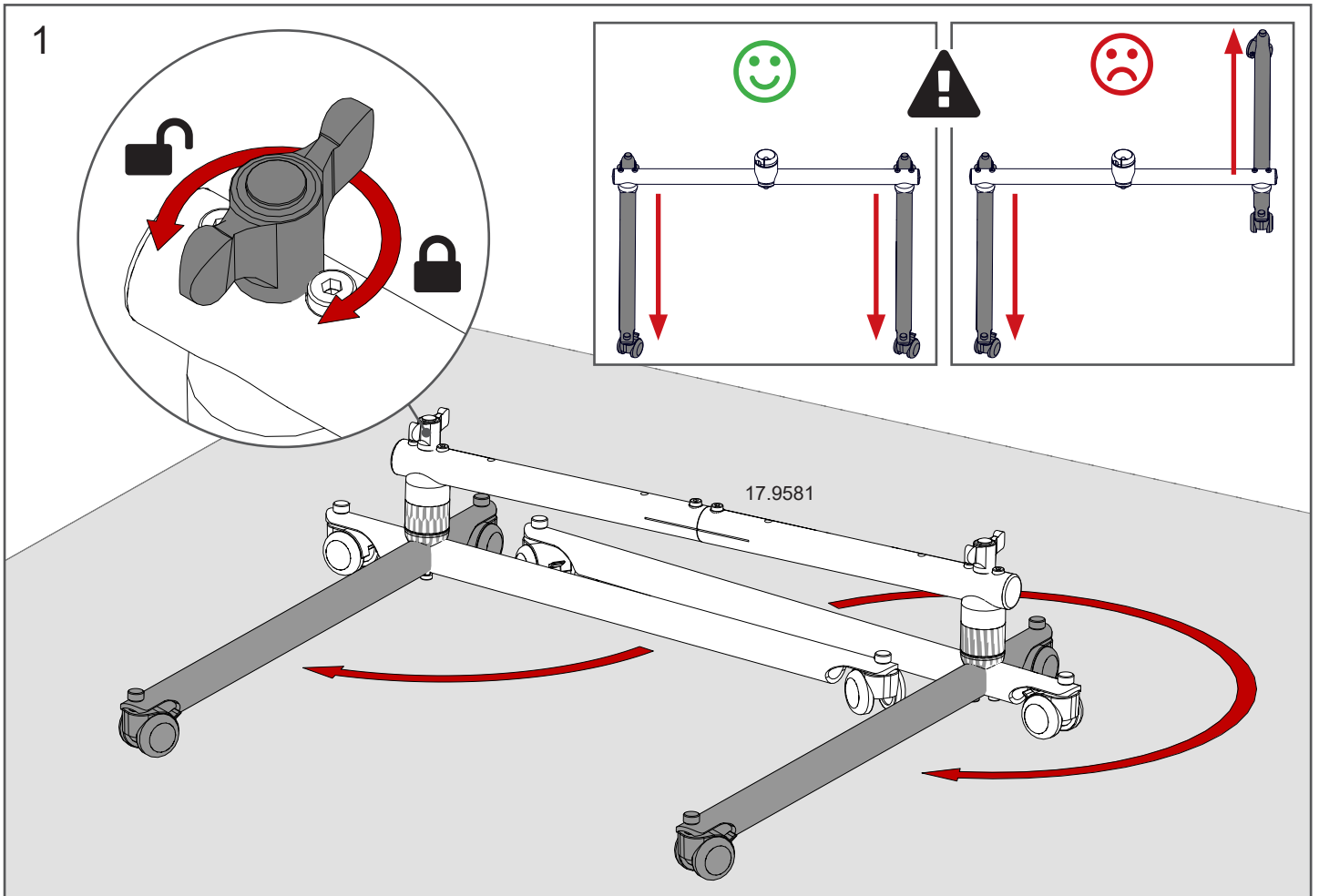


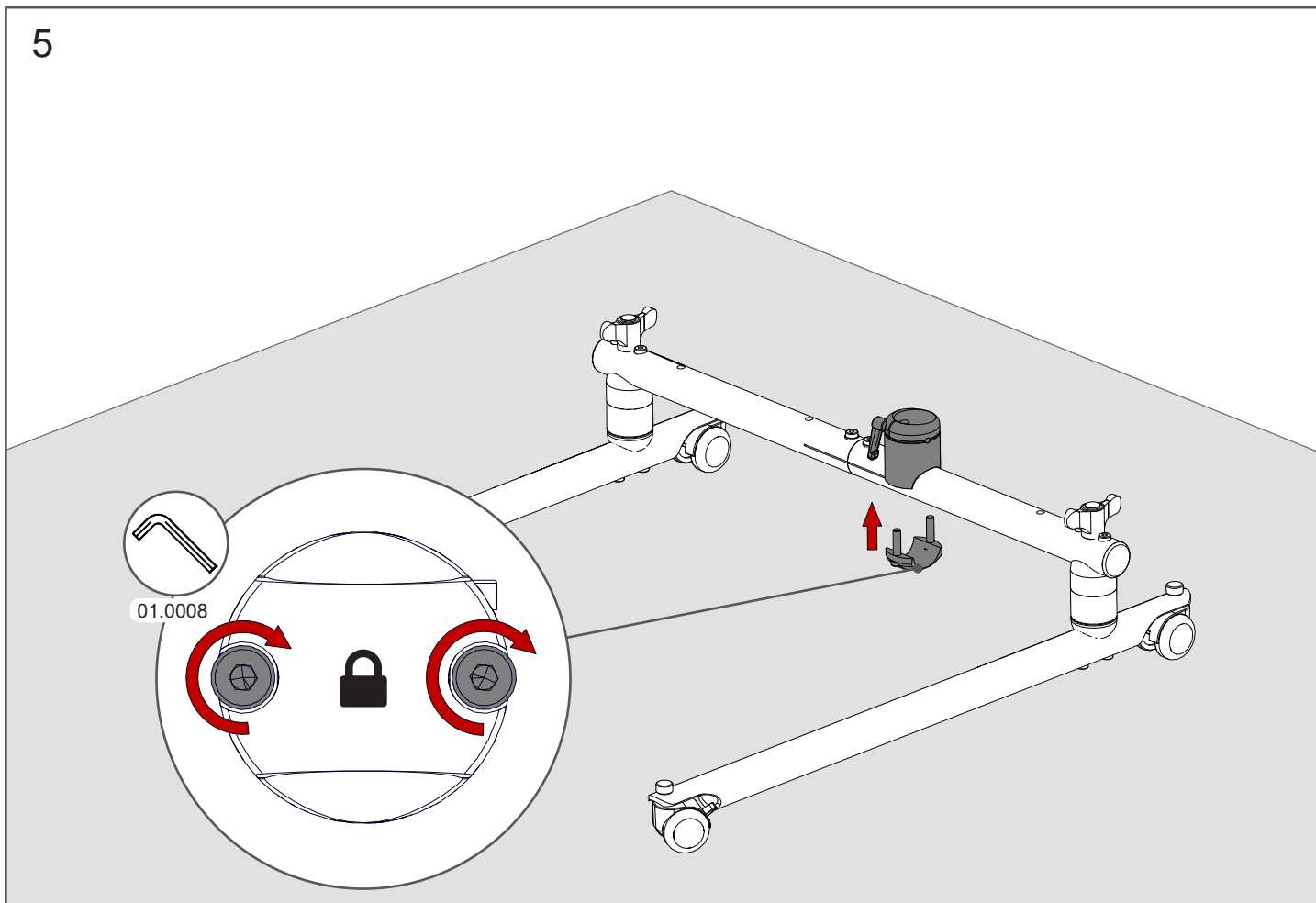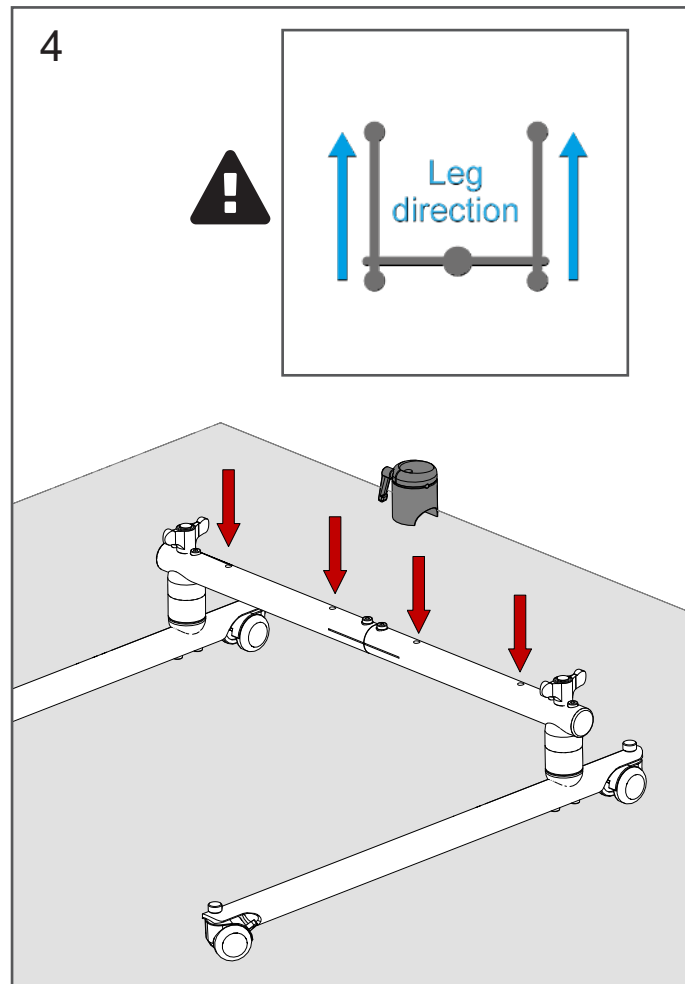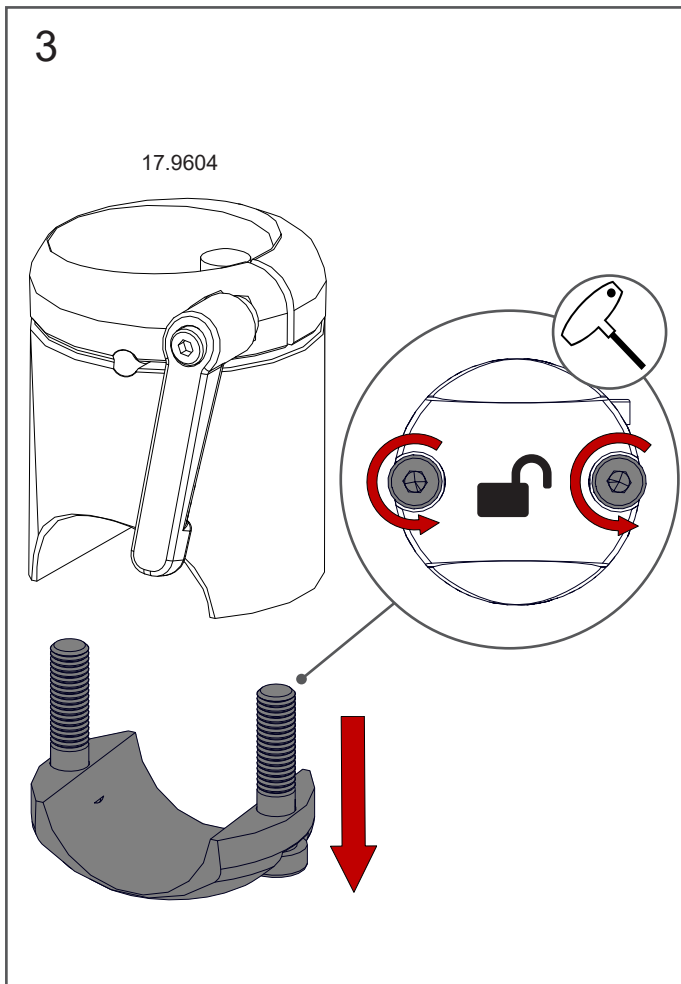

6

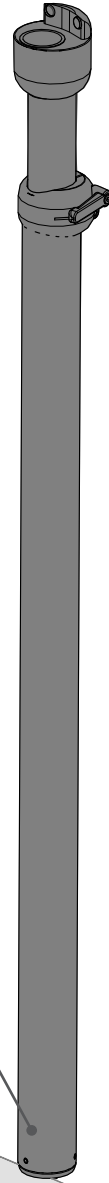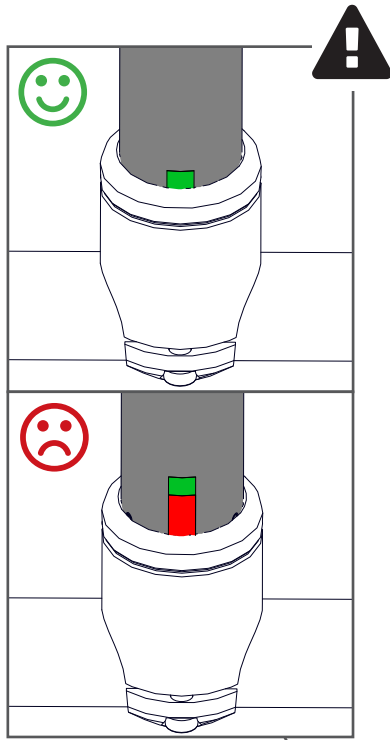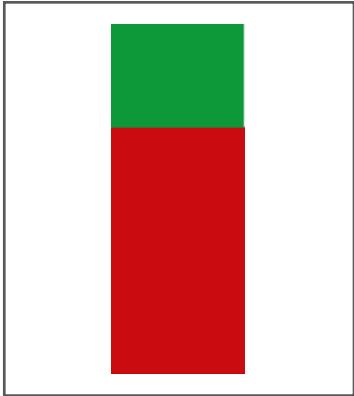


17.9609

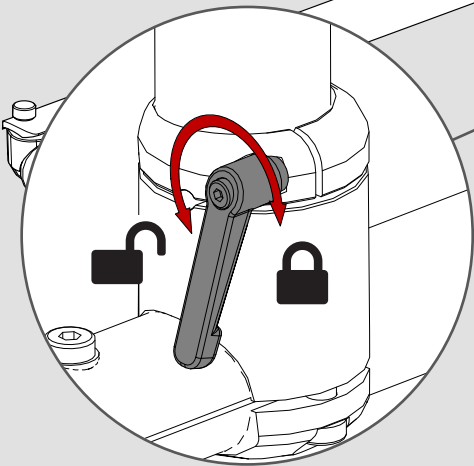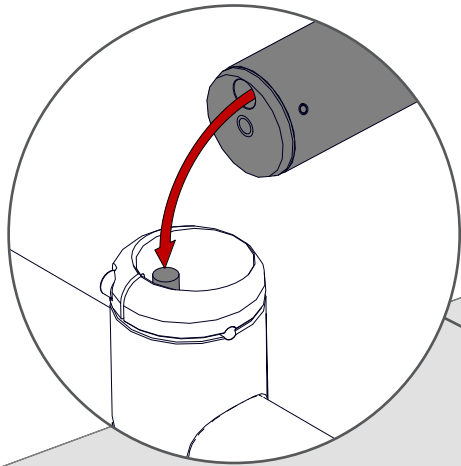

7






17.9610
17.9614

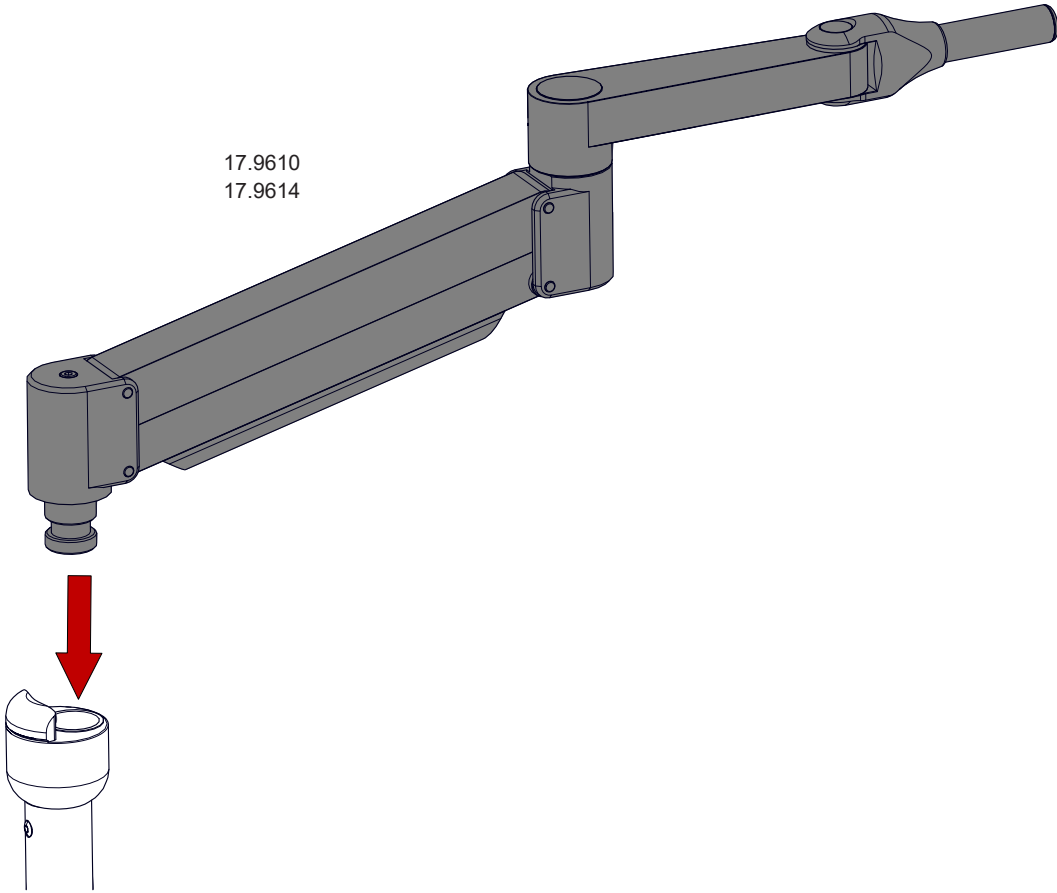

8

16.1051

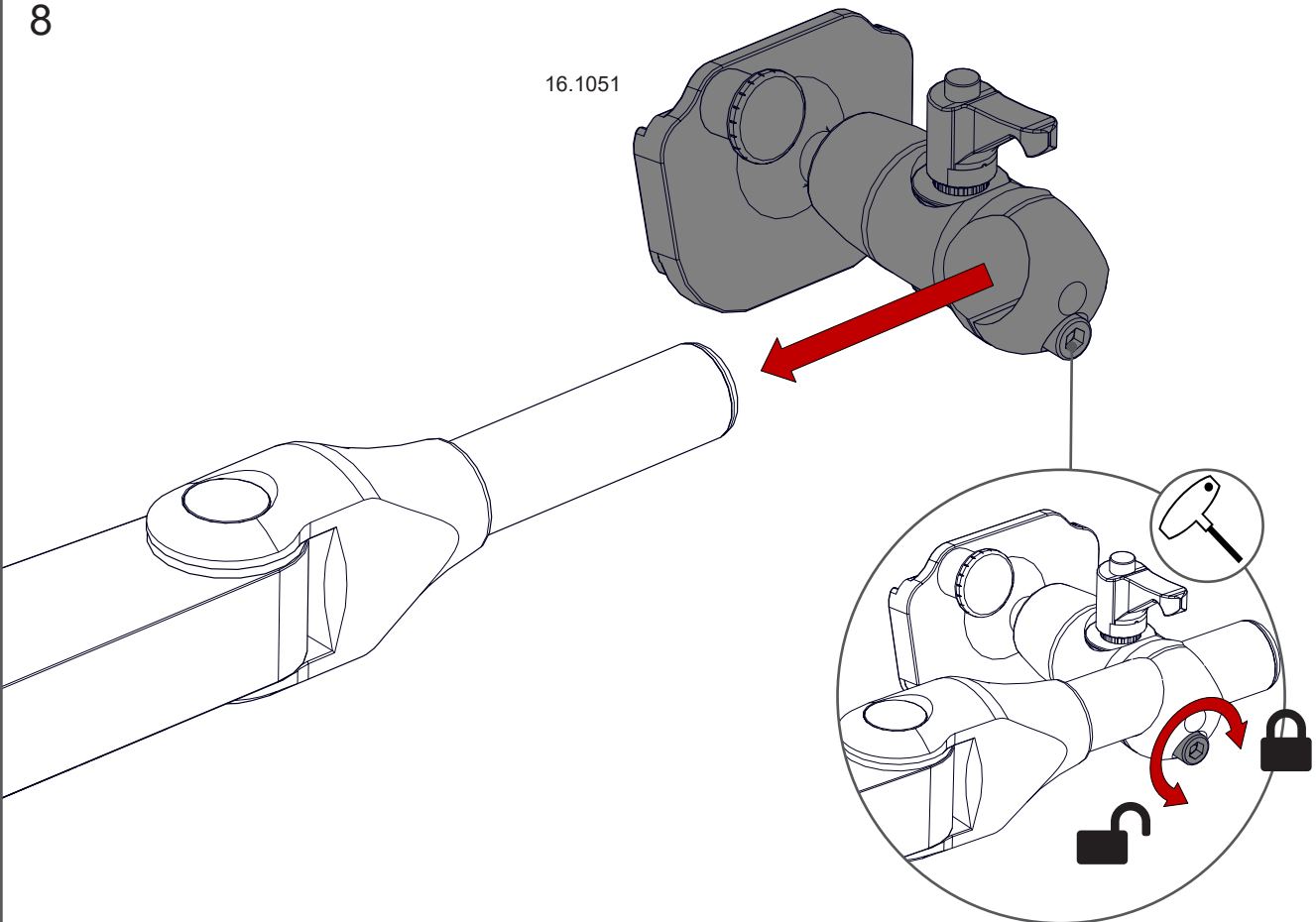

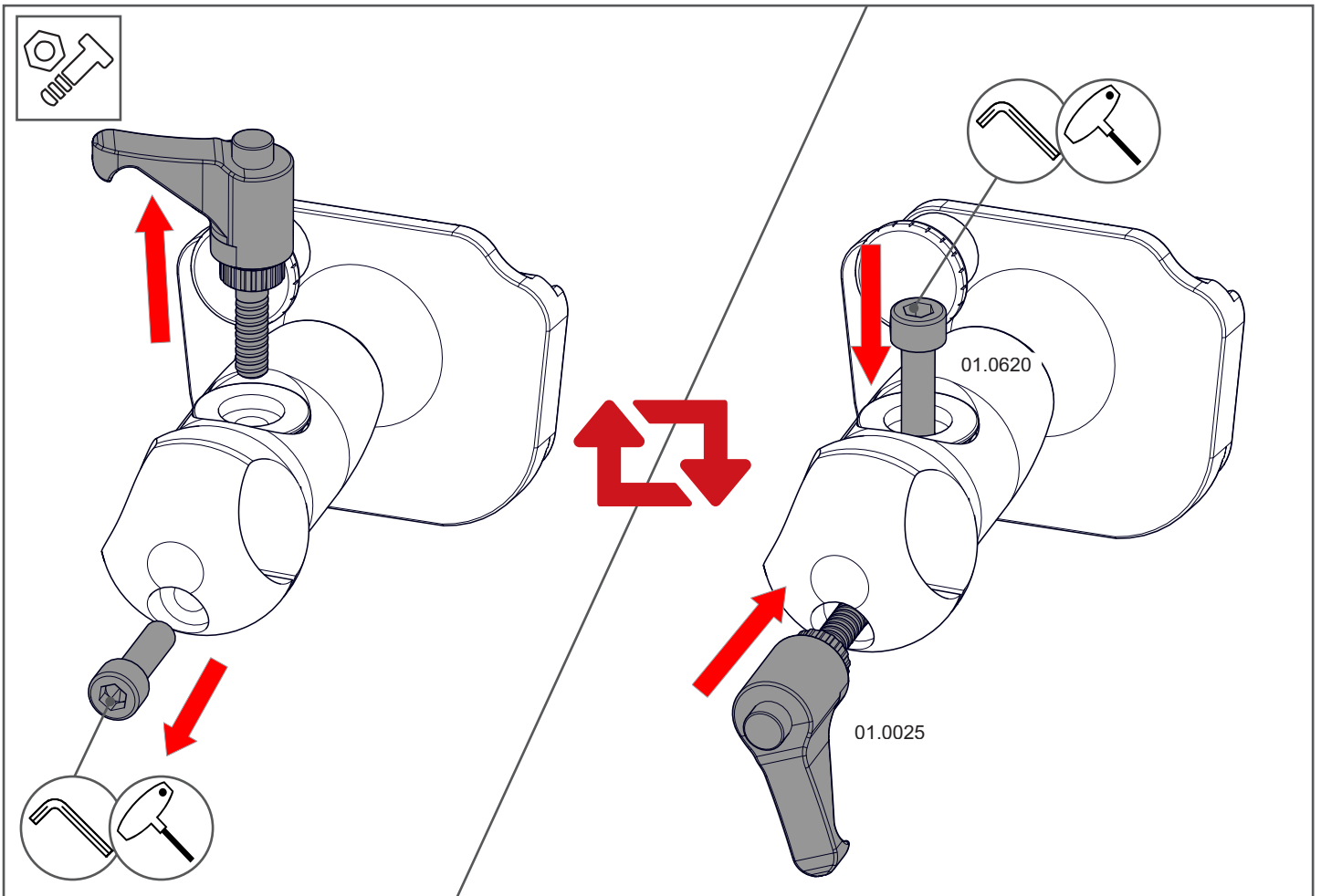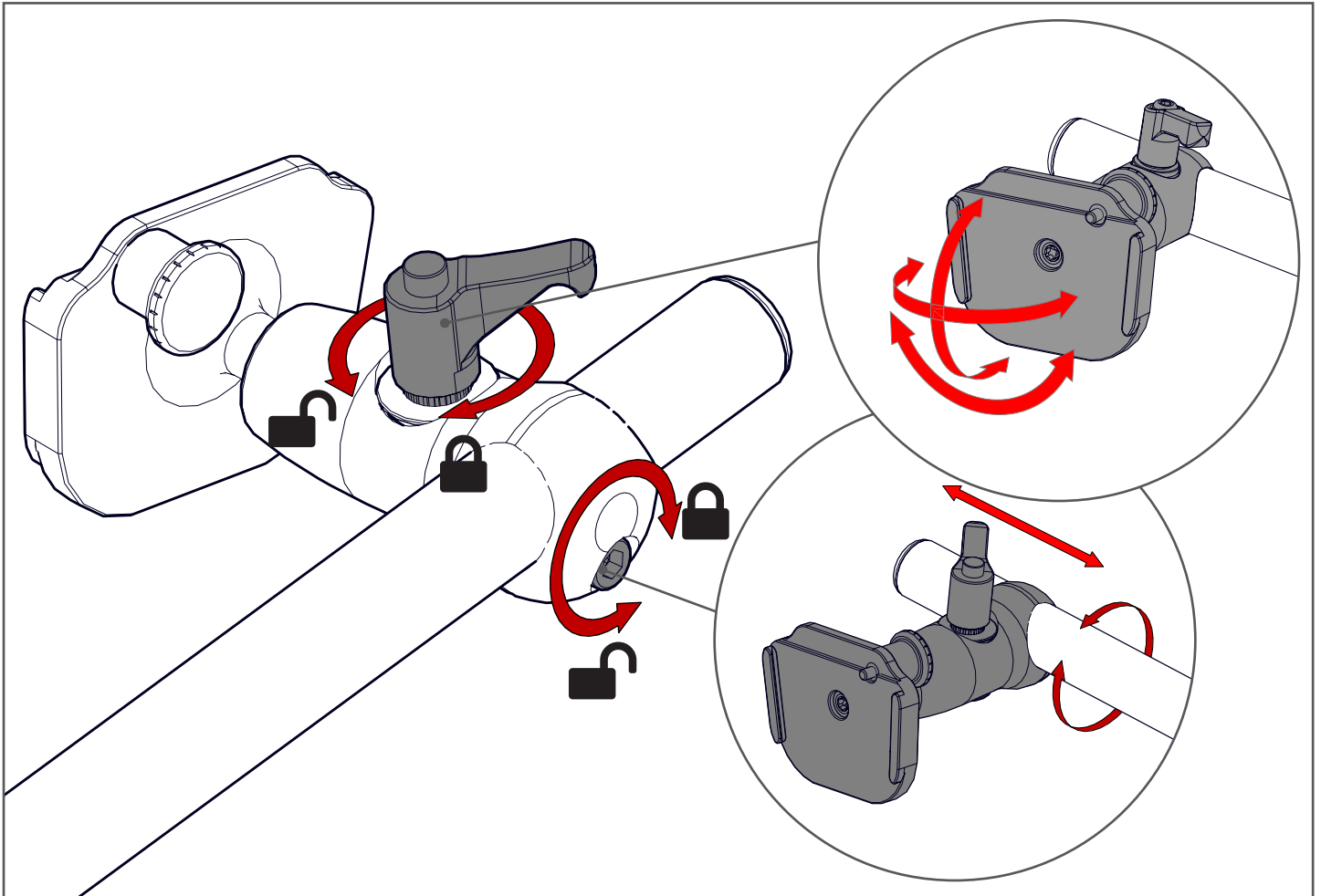



IMPORTANT!

- Device must be on arm
- Arm must be in mount



WICHTIG!



- Gerät muss montiert sein
- Arm muss in Halterung sein

Bring the arm to a position approximately horizontal prior to turning the strength adjustment screw.

Vor dem justieren der Einstellschraube drücken Sie den **Arm nach unten bis er ungefähr parallel zur Grundfläche ist.**



If the arm **drifts upward**, turn the adjustment screw clockwise.

Wenn der Arm **nach oben driftet**, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn.

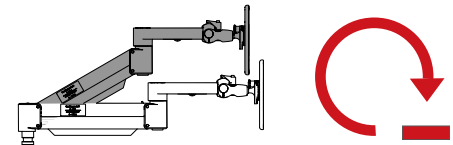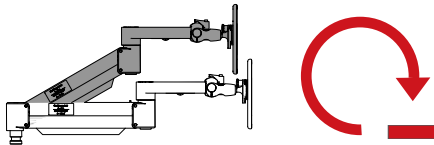

If the arm **drifts downward**, turn the adjustment screw counter-clockwise.

Wenn der Arm **nach unten driftet**, drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn.

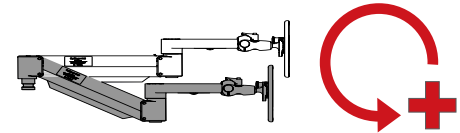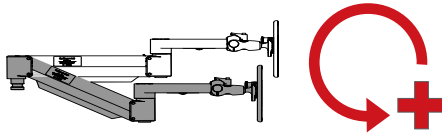

Depending on the weight of your device, **you may have to make 15-20 turns.**

Abhängig vom Gewicht Ihres Gerätes, müssen Sie möglicherweise **15-20 Umdrehungen durchführen.**

1

01.0437


Gerätgewicht
3-8kg
driftet weniger
8-10kg

EN


In some instances, further counterbalance adjustments are needed to allow the arm's instant height adjustment function to work properly.

If your arm is not staying in position after performing step 1, follow these steps:

With arm in raised position, tighten set screw (A)

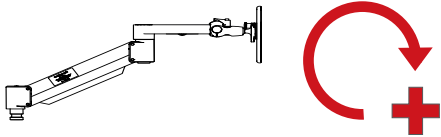

With arm in horizontal position, tighten set screw (B)

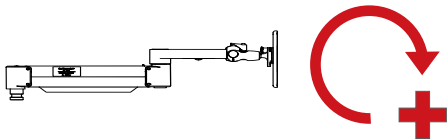


Do not overtighten the screws.

DE


In einigen Fällen sind weitere Gegengewichtseinstellungen notwendig, damit die korrekte Höheneinstellung des Arms möglich ist.

Wenn dein Arm nach der ersten Variante nicht in der gewünschten Position bleibt, folge diesen Schritten:


Mit erhobenem Arm, Stellschraube anziehen (A)


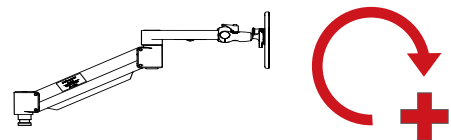











Mit Arm in horizontal Position, Stellschraube anziehen (B)


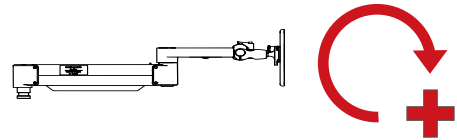


Schrauben nicht zu fest anziehen.

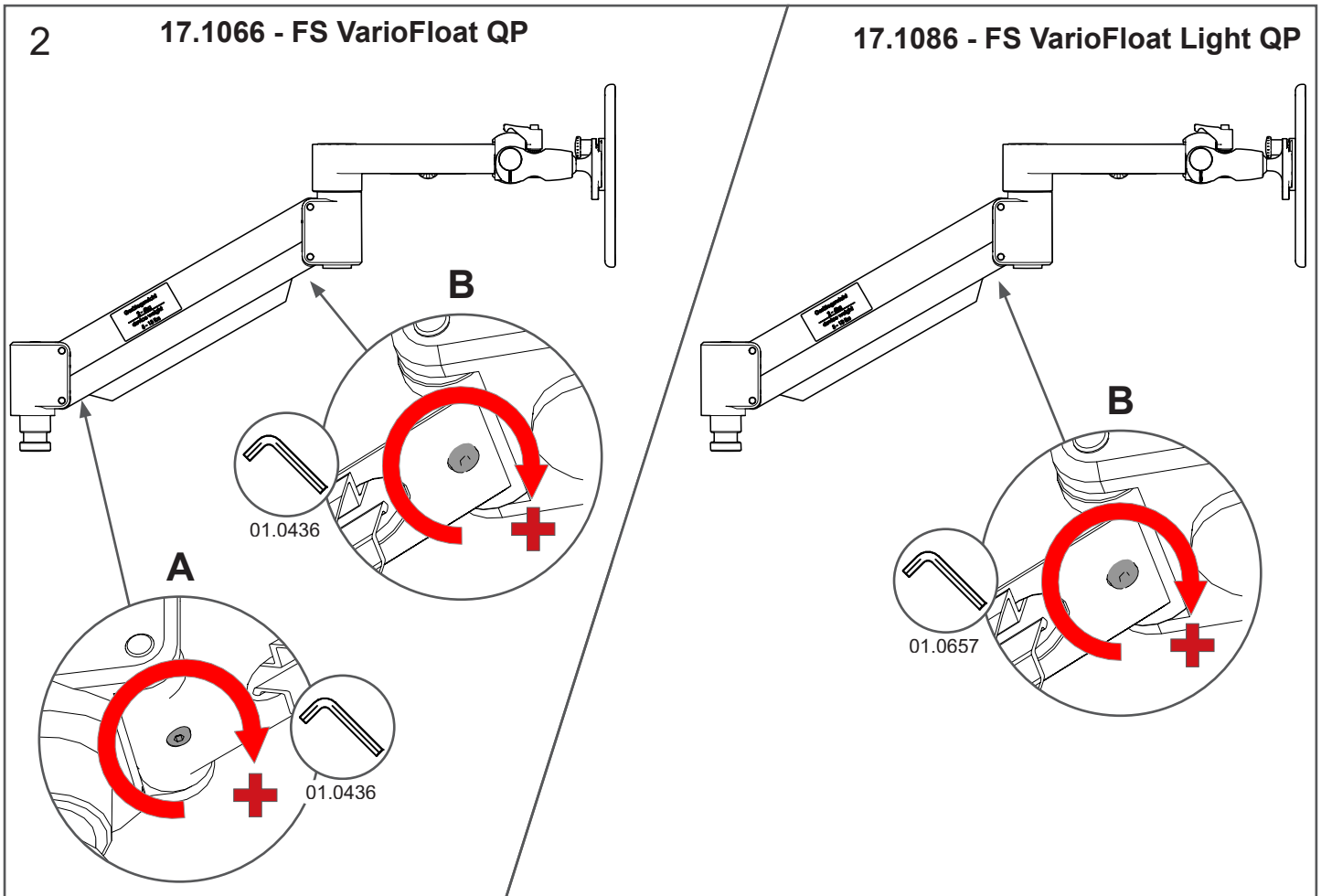

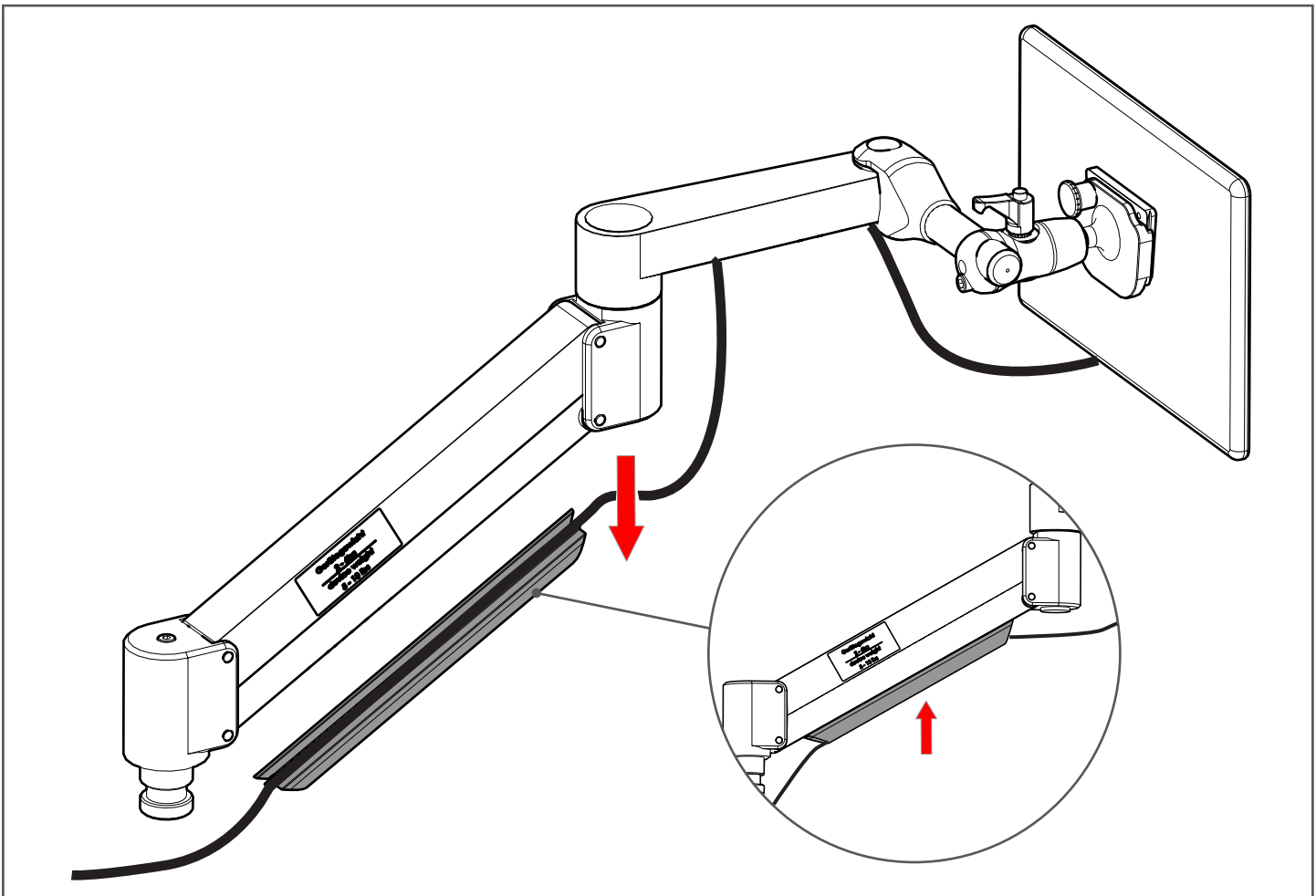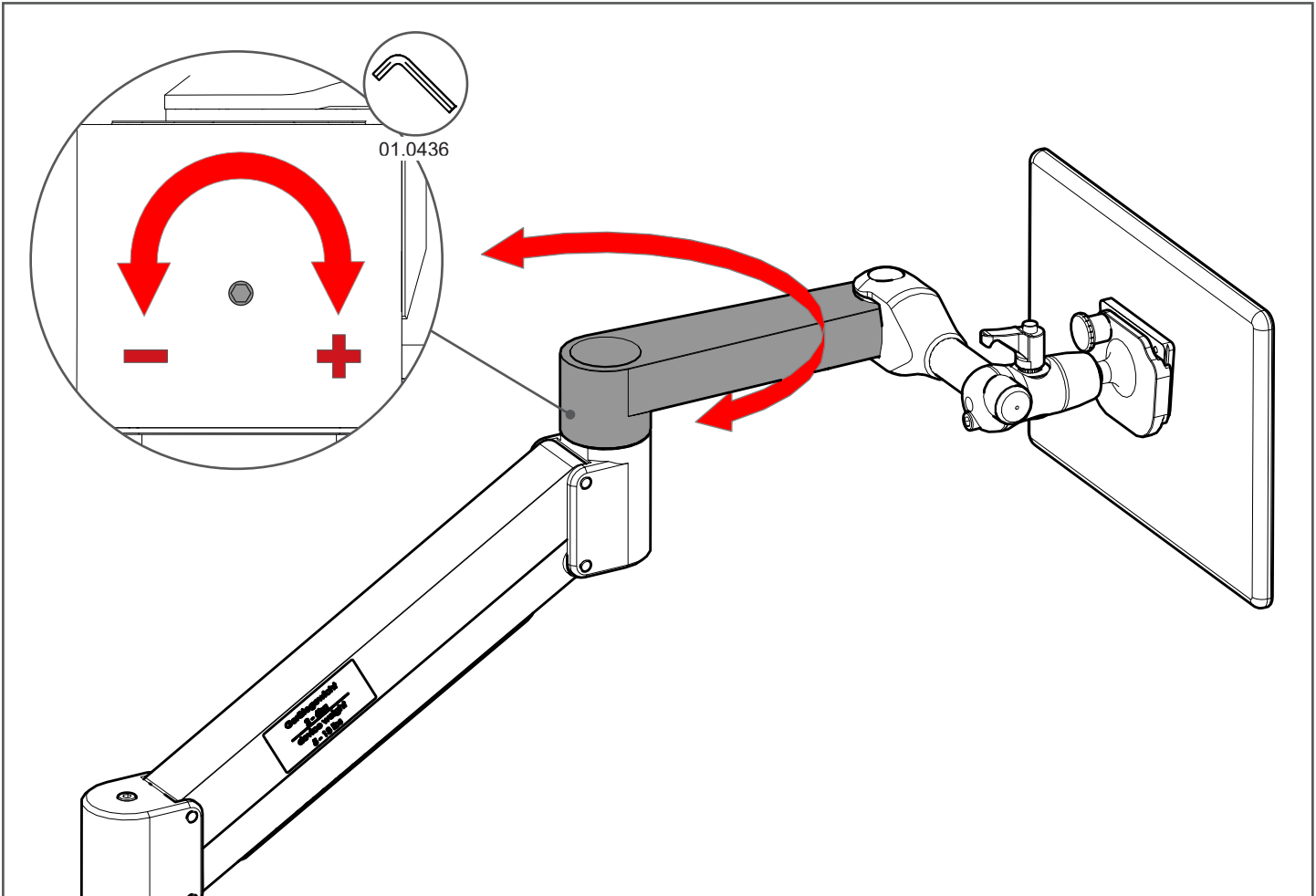

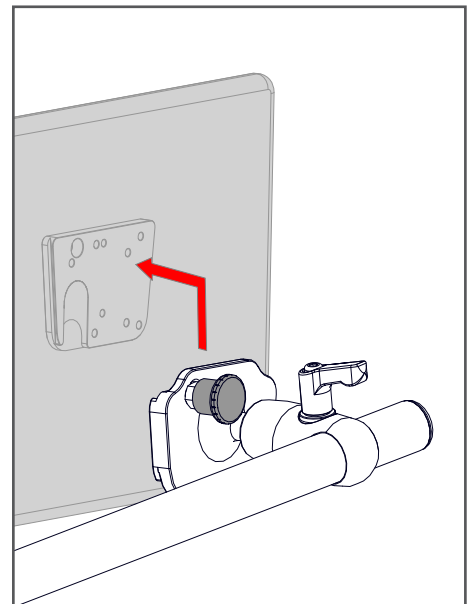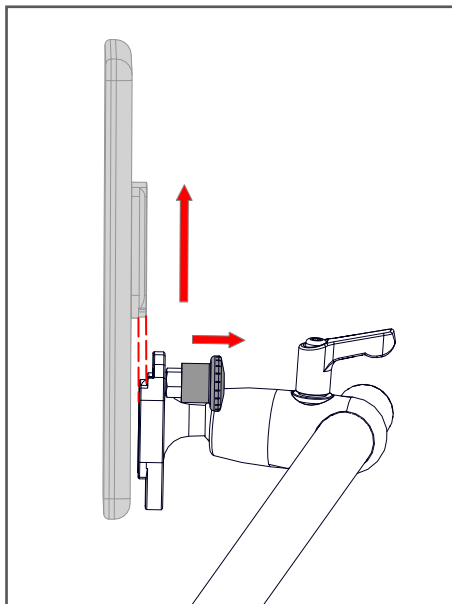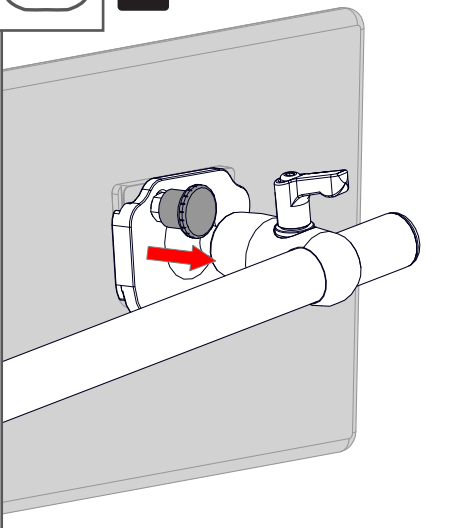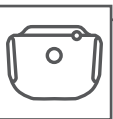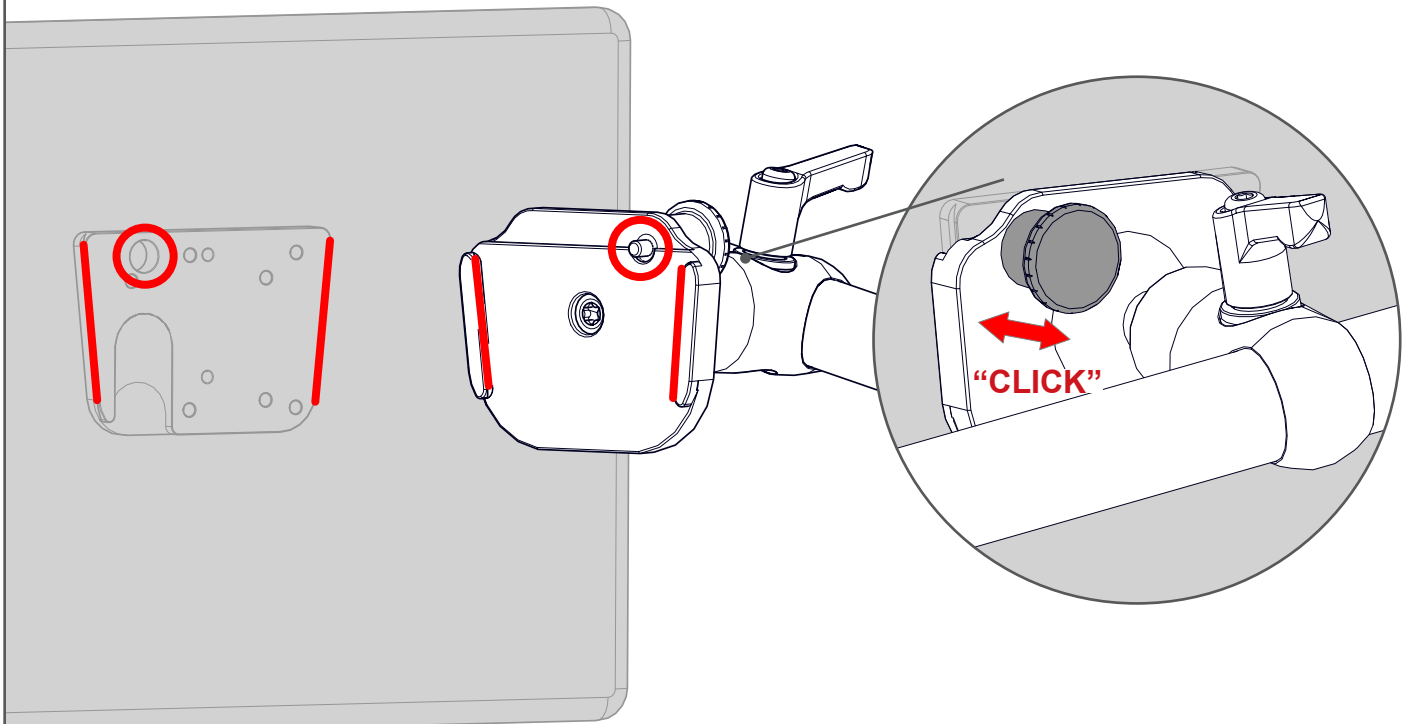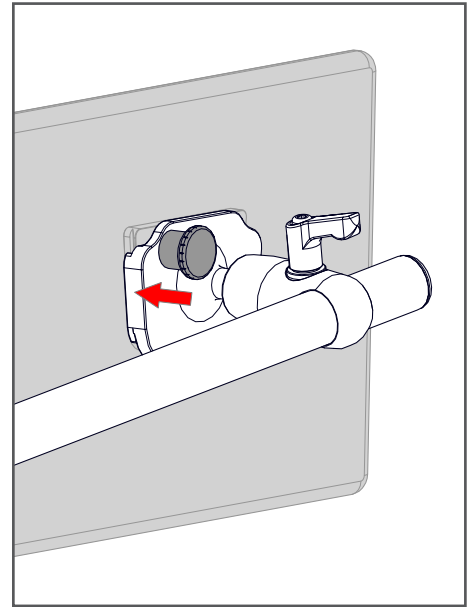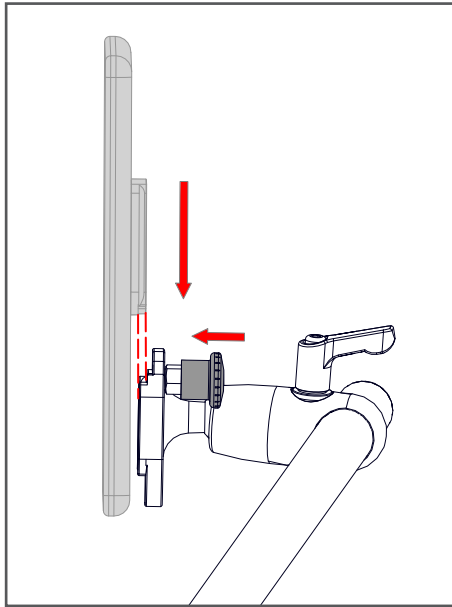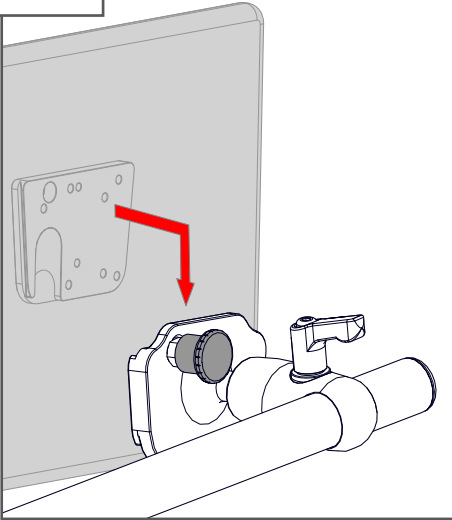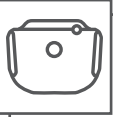

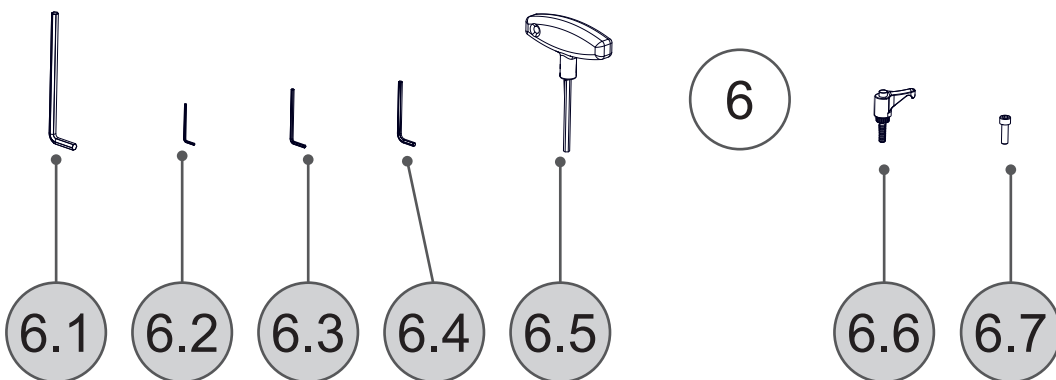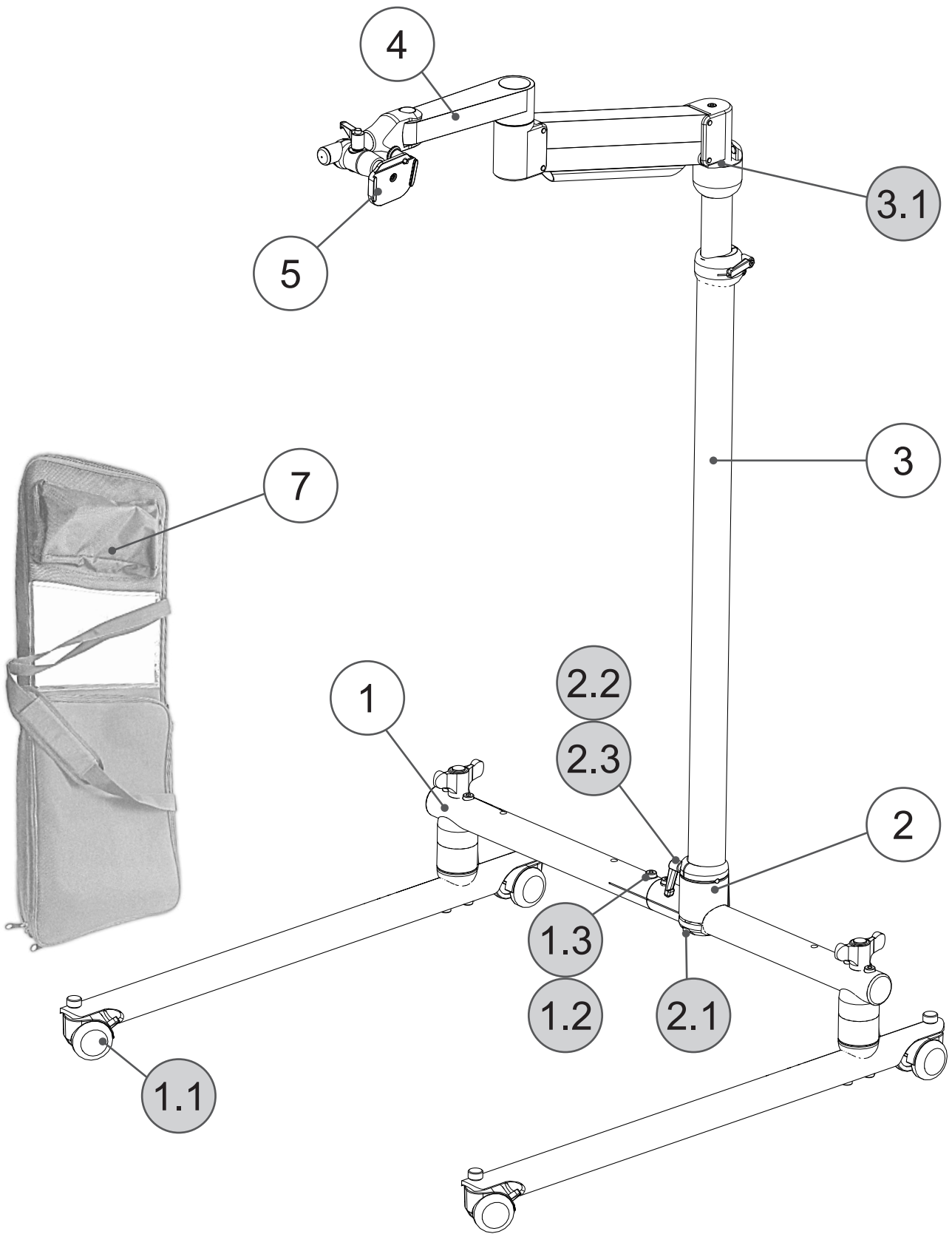


Pos.	No.	Bezeichnung	Description
1	17.9581	FS Fahrgestell Vario QP	FS Chassis Vario QP
1.1	17.9540	FS Classic Doppelrolle	FS Classic Swivel Caster
1.2	01.0369	Zylinderschraube M8x40	Cylinder head bolt M8x40
1.3	01.0394	Scheibe Ø8,4 mm	Washer Ø8.4 mm
2	17.9604	FS Knoten Float QP	FS Node Float QP
2.1	01.0835	Zylinderschraube M8x35	Cylinder head bolt M8x35
2.2	01.0021	Klemmhebel M6x20	Clamping lever M6x20
2.3	01.0393	Scheibe Ø6,4 mm	Washer Ø6.4 mm
3	17.9609	FS Säule TeleFloat	FS Column TeleFloat
3.1	01.0109	Gleitlager FloatArm	Sleeve Bearing FloatArm
4*	17.9614	FS Arm Float Light	FS Arm Float Light
4**	17.9610	FS Arm Float	FS Arm Float
5	16.1051	UGA-22-DC	UDS-22-DC
6		Montagekit	Mounting kit
6.1	01.0008	Innensechskantschlüssel 5mm lang	Allen wrench 5mm long
6.2	01.0436	Innensechskantschlüssel 3/32"	Allen wrench 3/32"
6.3	01.0657	Innensechskantschlüssel 1/8"	Allen wrench 1/8"
6.4	01.0437	Innensechskantschlüssel 7/32"	Allen wrench 7/32"
6.5	01.0027	T-Griff	T-Handle
6.6	01.0025	Klemmhebel M6x20	Clamping lever M6x20
6.7	01.0620	Zylinderschraube M6x20	Cylinder head bolt M6x20
7	02.0003	Transporttasche für FS QuickPack	Transport bag for FS QuickPack

* **17.1086** FS VarioFloat Light QP

** **17.1066** FS VarioFloat QP



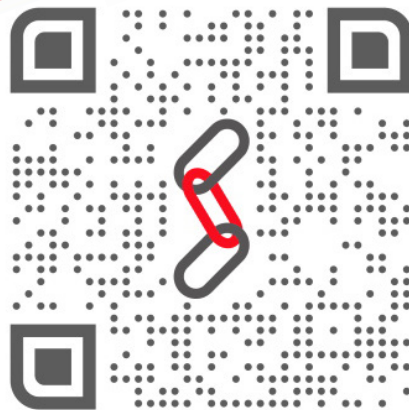

Rehadapt Engineering
GmbH & Co. KG

📄 Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany

☎ Tel.: +49 561 220 717 0
📠 Fax: +49 561 220 717 99

✉ officeteam@rehadapt.com
🌐 <https://rehadapt.com>



Rehadapt
North America

📄 40 Oser Ave, Suite 40-01
Hauppauge, NY 11788, USA

☎ Tel.: 1 (888) 635-6962
📠 Fax: 1 (888) 635-6962

✉ officeteam.na@rehadapt.com
🌐 <https://rehadapt.com>